



PODOLAB
HOEKSCHE WAARD

CERTIFICERING BATA INDUSTRIALS

Bestellen via lab.plhw.nl



Bata Industrials®
IMPROVING WORKING LIVES

Over PLHW

Al jaren verzorgt Podolab Hoeksche Waard met veel succes de productie van steunzolen voor vele bedrijven. Alle medewerkers van PLHW worden intern opgeleid tot ware specialisten binnen het vak. Al onze medewerkers in staat om te werken volgens diverse systemen. Zo kunt u bij ons niet alleen terecht voor de uitbesteding voor het handmatig vervaardigen van zolen, maar vervaardigen wij ook zolen met moderne Cad Cam technieken.



Bata Industrials
IMPROVING WORKING LIVES



Werkinstructie voor het vervaardigen van individuele orthopedische en podotherapeutische inlegzolen voor veiligheidsschoenen

Deze werkinstructie bevat alle informatie welke relevant is voor de podotherapeut, podoloog en orthopedisch schoenmaker om een individuele inlegzool te vervaardigen met behoud van de normen **EN-ISO-20345:2011** welke in overeenstemming zijn met de bepalingen in de richtlijn 89/686/EEC*96/58/EC. Deze instructie is uitsluitend toe te passen in combinatie met reeds gecertificeerde **Bata Industrials** veiligheidsschoenen.

WERKWIJZE:

1. BORGING CERTIFICERING EN CERTIFICATEN OVERZICHT
2. WERKINSTRUCTIE/STAPPENPLAN
3. PROCEDURE BEHOUD VAN VEILIGHEIDSNORM




1. Borging certificering

Indien de standaard inlegzool uit een Bata veiligheidsschoen wordt verwijderd en vervangen door een reguliere of gepersonaliseerde inlegzool vervalt de EN norm onmiddellijk. Om hier een passende oplossing te bieden kunt u gebruik maken van de volgende productiewijze waarmee behoud van certificering gegarandeerd is. Het is van belang dat u deze instructie en procedure volledig en correct uitvoert.

Het gebruik van de Bata Ortho Layer garandeert de juiste vochtregulering, slijtweerstand, elektrostatische ontlading, schokabsorptie en resthoogte onder de veiligheidsneus.

Bij deze constructie kunnen de volgende collecties van Bata Industrials worden ingezet met behoud van de certificering:

- Forward
- Nova
- Enduro
- City

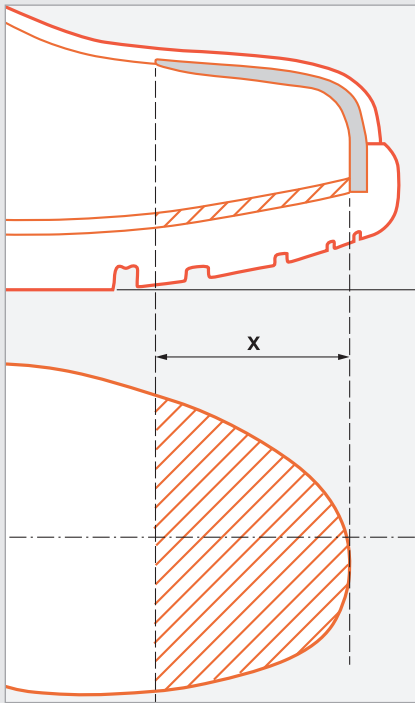

Figuur 1

Lengte X per maat	
Maat 35/36	$X \geq 58 \text{ mm}$
Maat 37/38	$X \geq 61 \text{ mm}$
Maat 39/40	$X \geq 65 \text{ mm}$
Maat 41/42	$X \geq 68 \text{ mm}$
Maat 43/44	$X \geq 72 \text{ mm}$
Maat 45/46	$X \geq 75 \text{ mm}$
Maat 47/53	$X \geq 79 \text{ mm}$

Toelichting: Deze constructie is noodzakelijk in verband met het garanderen van de minimale resthoogte onder de veiligheidsneus.

2. Werkinstructie/stappenplan

STAP 1

Bata Adapt heeft in samenwerking met PLHW de Bata Ortho Layer ontwikkeld voor het bekleden van uw eigen gepersonaliseerde inlegzolen.

Het grote voordeel van de Bata Ortho Layer is dat u geheel vrij bent in het gebruik van uw eigen materialen voor het vervaardigen van uw inlegzolen. Dit betreft ook de verlijming van de Bata Ortho Layer op uw inlegzolen. U bent hierin niet verplicht ESD lijm te gebruiken. De samenstelling en de constructie van de Bata Ortho Layer zorgt er voor dat de EN norm wordt gewaarborgd.

Let er op dat u uw inlegzool over de volledige lengte bekleed met de Bata Ortho Layer met inachtneming van de toegestane maximale lengte van de inlegzool. De maximale lengte waarin u uw steunzool mag vervaardigen staat per maat aan de onderzijde van de Bata Ortho Layer aangegeven.

Om de EN norm te waarborgen mag er geen opbouw materiaal van uw inlegzolen onder de veiligheidsneus worden gebruikt ter hoogte van de aangegeven lengte zoals aangegeven in figuur 1.

De Bata Ortho Layer is ontworpen met de maximaal toegestane dikte onder de veiligheidsneus.

Figuur 1 illustreert het gebied onder de veiligheidsneus per maat.

De Bata Ortho Layer wordt geleverd in 4 maatgroepen van 4 maten elk. Om de inlegzool in de juiste lengte en pasvorm te krijgen is de Bata Ortho Layer aan de onderzijde voorzien van meerdere afteken lijnen. U kunt de inlegzool afknippen op de juiste lijn voor de gewenste maat.



Om de inlegzool eenvoudig op de juiste lengte af te knippen (3/4) alsmede de gehele inlegzool inclusief de Bata Ortho Layer (1/1) kunt u bij PLHW voor beide varianten grondzoolpatronen van de Bata binnenzoolpatronen bestellen.

De grondzoolpatronen zijn te bestellen bij PLHW door te mailen met als onderwerp 'Bata grondzoolpatroon'.

STAP 2

Registreer uw gepersonaliseerde inlegzolen in de registratiesoftware van PLHW/Bata. Ga hiervoor naar www.plhw.nl en klik op de button **dealer login** (let op: openen in Chrome, Edge of Safari).

Kijk voor een complete instructie van onze registratie software in PDF op (www.plhw.nl/downloads) of op [YouTube](https://www.youtube.com).

Zodra u de gehele registratie heeft doorlopen krijgt u een dossiernummer en een ordernummer. Deze twee nummers vormen samen een unieke code die u onder de inlegzool dient te vermelden.



3. Procedure behoud van veiligheidsnorm

Om de door u vervaardigde gepersonaliseerde inlegzool deel te laten uitmaken van de gecertificeerde Bata veiligheidsschoen is het noodzakelijk om deze inlegzool te registreren.

Registratie vindt plaats via de website van PLHW: lab.plhw.nl.
(let op: openen in Chrome, Edge of Safari).

De unieke code dient u ook aan de onderzijde van de inlegzool te noteren zoals beschreven in de werkinstructie stap 2.

